

Lien internet : [Questionnaire HABILITATION GAZ DU SANG DELOCALISE V8](#)

Questions

Date d'habilitation :/..../20....

Questionnaire Habilitation Gaz Délocalisé



Ce questionnaire est destiné aux personnels formés à l'utilisation d'un appareil à gaz du sang ABL90 en vue de leur habilitation

Adresse e-mail *

Adresse e-mail valide

Ce formulaire collecte les adresses e-mail. [Modifier les paramètres](#)

Indiquer votre NOM et votre PRENOM *

Réponse courte

Quel est votre établissement ? *

- IMM
- RIST
- CURIE

Motif d'habilitation *

- Habilitation initiale
- Habilitation après arrêt prolongé
- Critères de maintien non respectés

Questionnaire Habilitation Gaz du Sang

Quel élément indispensable doit se trouver sur la seringue avant de réaliser l'analyse? * 1 point

- Le code à barre de la seringue
- L'identité complète du patient
- L'aiguille

Est-il possible d'utiliser des contenants (tubes, seringues) non héparinés pour réaliser les examens? * 1 point

- Oui
- Non

A partir du moment où le gaz a été prélevé, quel est le délai de stabilité des gaz du sang à température ambiante? * 1 point

- Maximum 15 minutes
- Maximum 30 minutes
- Maximum 1 heure

Quelles affirmations ci-dessous entraînent des résultats erronés? * 1 point

- La présence d'air dans l'échantillon
- Un échantillon non hépariné
- Une mauvaise homogénéisation
- Aucune de ces propositions

Un paramètre est jaune à l'écran, est-il possible d'obtenir un résultat pour ce paramètre? * 1 point

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
- Oui
- Non

QUESTIONNAIRE D'HABILITATION
« GAZ DU SANG DELOCALISE »

- On ne peut plus modifier la température après avoir passé le gaz

Comment ré-imprimer les résultats une fois le gaz passé? *

1 point



- On ne peut pas

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
- A partir de l'écran d'accueil, cliquer sur Fichier en haut à droite du feu tricolore puis sur Fichier Résultats patients. Sélectionnez le gaz dans la liste. Sur l'écran des résultats du gaz, appuyez sur la touche "Impr"

Que faites-vous si vous vous apercevez, une fois le gaz passé, que l'étiquette que vous avez utilisée n'est pas celle du patient qui a été prélevé et que donc les résultats ont été affectés à un autre patient?

* 2 points

- Je modifie l'identité du patient
- J'informe le laboratoire
- Je modifie le nom sur le ticket

Décrire les étapes pour modifier l'identité du patient en cas d'interversion * 2 points
d'étiquettes patients



- Je retourne sur l'identification du patient : Fichier Résultats Patients, je sélectionne le gaz puis la touche Résultats puis la touche ID
- Une fois, sur la fiche Identification Patient, je sélectionne le champ ID et je scanne la bonne étiquette
- J'appelle le laboratoire pour que les résultats soient annulés dans le dossier de l'identité erronée

E n cas de problème d'identification d'un gaz, où trouver les numéros de téléphone à contacter? * 1 point

- sur l'écran d'accueil de l'appareil
- dans le classeur bleu comportant la documentation
- sur l'affichage à proximité de l'appareil

J'ai scanné le code barre de l'étiquette patient pour identifier le gaz dans l'appareil mais le nom du patient n'apparaît pas. Pourtant le code barre a bien été lu. Que faites vous? * 2 points

- Pas d'action
- J'identifie le patient en renseignant les nom, prénom et date de naissance
- Je préviens le laboratoire ou la personne référente du service

Rubrique 3 sur 4

Evaluation de la formation



Description (facultative)

La formation que vous venez d'avoir vous a-t-elle apportée satisfaction? *

Oui

Non

Si non, laissez-nous vos suggestions pour l'améliorer

Réponse longue

Merci de votre participation! Pour consulter les réponses, cliquer sur "voir votre score". **Habilitation validée si score au moins égal à 12**