

		Laboratoire	Réf.: M1-FT-PVT-11 – V10
<b>Fiche Technique</b> <b>TUBES : RECOMMANDATIONS D'UTILISATION</b>			
<b>Date d'application : 14/09/2023</b> <b>Version : 10</b> <b>Nombre de pages : 1</b> <b>Nombre d'exemplaire : 1 PVT, 1 Réception, 4 salles pvt, 4CS, 4 salles pvt CS (GDE)</b>	Rédacteur	GREBAUT ISABELLE	28/08/2023
	Contrôleur	HERAN JENNIFER	28/08/2023
	Approbateur	GAULIER EVA	06/09/2023

## DESCRIPTIF

Tableau rempli selon les recommandations fournisseur

Tube	Agitation par retournement	Précautions pour le préleveur	Précautions techniques
	/	 Ne pas utiliser pour obtention de sérum	/
	X 4 lents	 Trait sur le tube = volume minimal	/
	X 6 lents	 Noter l'heure de prélèvement sur le tube	 Reprise en masse totale (30 min) *
	X 6 lents	 Noter l'heure de prélèvement sur le tube	 Reprise en masse totale (60 min) *
 micro tube EDTA	X 8 lents	/	/
	X 10 lents	/	/
	X 10 lents	/	/
	/	/	/
	X 2 -3 lents	 8 à 10 ml de sang	/
	X10 lents	/	 Reprise en masse totale (30 min) *
	X5 lents	/	/
	X1 lent	 Bien remplir au trait de jauge 1,3 ml	/
	X 10	 Trait sur l'étiquette du tube = volume minimal	/

\* Le technicien de la réception vérifie la prise en masse des tubes jaunes et rouges.